



WIE NIMMT MAN EINE KOTPROBE ?

1. Nehmen Sie eine Kotprobe immer frühestens 2 Wochen nach der letzten Entwurmung.
2. Achten Sie bei jeder neuen Probe auf saubere Handschuhe oder verwenden Sie neue Einweghandschuhe.
3. Nehmen Sie die Kotprobe immer von möglichst frischem Kot.
4. Ein (1) Apfel pro Pferd reicht völlig aus! Von Ponys nehmen Sie 2 Äpfel. (Für den Standardwurmtest reichen 4 g aus; für den Test auf Leberegel werden 15 g benötigt.)
5. Nehmen Sie für die Probe obenauf liegende Pferdeäpfel, die nicht mit dem Erdboden in Kontakt gekommen sind.
6. Achten Sie darauf, dass die Kotprobe von dem zu untersuchenden Pferd stammt.
7. Nehmen Sie den verschließbaren Frischhaltebeutel und geben Sie 1 Pferdeapfel (2 bei Ponys) hinein. Mehr wird für die Analyse(n) nicht benötigt. Auch wenn Sie eine Dose für den Versand verwenden, gilt diese Mengenangabe.
8. Verschließen Sie den Frischhaltebeutel oder die Dose gut. Weitere Tüten und/oder Klebeband o.Ä. sind jedoch unnötig und erschweren die Probenuntersuchung!
9. Tragen Sie den Namen des Pferdes auf dem Etikett ein und befolgen Sie die folgenden Schritte für Frischhaltebeutel/Dosen:
 - Legen Sie den Frischhaltebeutel mit dem Trockenmittel drumherum in den Papphalter. Achtung: Das Trockenmittel **NICHT IN** den Frischhaltebeutel geben!
 - Das Ganze in die blaue Versandtasche stecken. Den ausgefüllten Fragebogen ebenfalls in die Versandtasche stecken.
 - (Auf dem blauen Umschlag steht auch „Röhrchen“ angegeben. Dies ist bei uns nicht relevant, da wir Frischhaltebeutel verwenden).
 - **Oder:** Stecken Sie die Dosen in den Versandkarton und legen Sie den ausgefüllten Fragebogen dazu.
10. Entfernen Sie den Klebestreifen und verschließen Sie die Versandtasche oder den Karton gut. Jetzt können Sie die **Briefmarken aufkleben** und das Ganze abschicken.

